


SIRINGHE AUTOMATICHE SOCOREX® ULTRA 1810


Porta flacone - Guida Rapida

Posizionamento del corpo

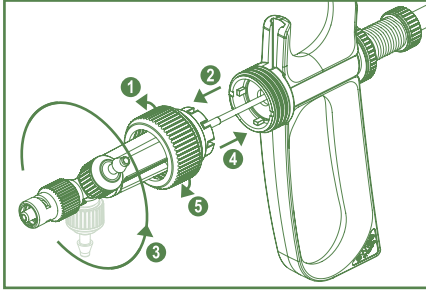


Porre la valvola di aspirazione in posizione verticale.

Montaggio della bottiglietta

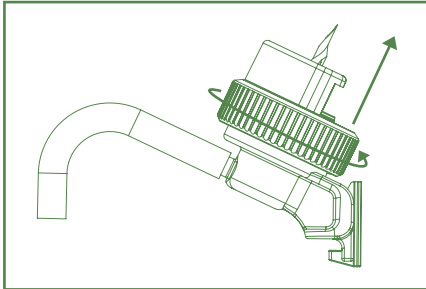


Rimuovere il blocco della bottiglietta.


Assemblaggio

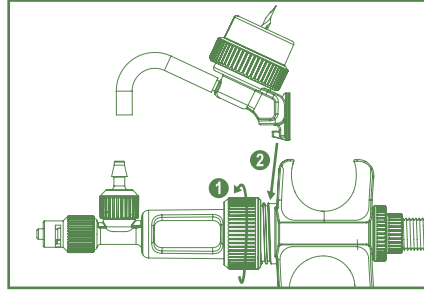


Svitare il dado della siringa. Inserire il corpo del porta flacone fino alla spalla.

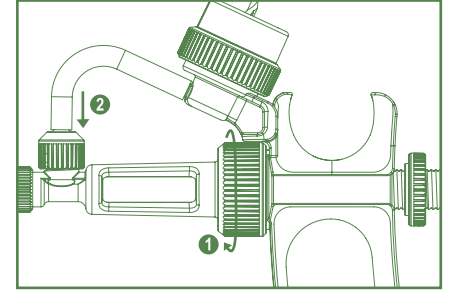


Stringere la vite per serrare il corpo del porta flacone. Collegare il tubicino alla valvola di ingresso.

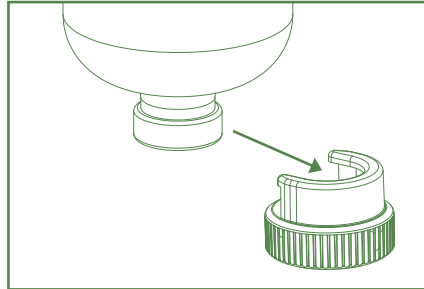


Inserire la bottiglietta nel blocco.

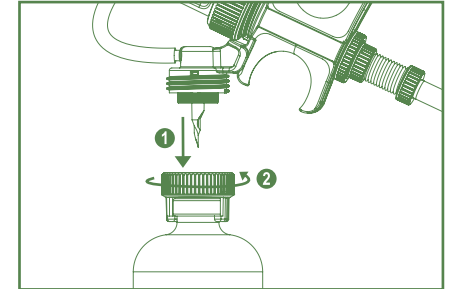

Tenendo la siringa sottosopra, perforare il setto con l'ago. Avvitare per serrare in modo fermo la bottiglietta.


 Non serrare eccessivamente (rischio di danno alla cartuccia della valvola).

Avviamento

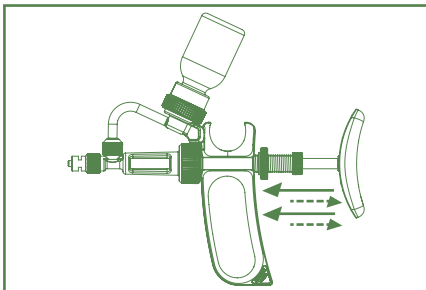


Capovolgere la siringa, attivare per aspirare ed espellere il liquido.

Rimozione della bottiglia

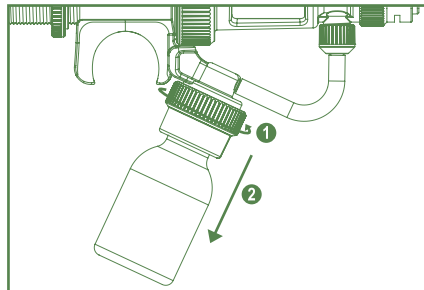


Capovolgere la siringa sottosopra. Svitare per rimuovere la bottiglietta.

Depurazione e risciacquo

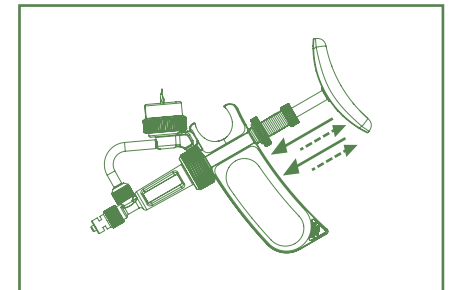


Attivare lo stantuffo per rimuovere il liquido.

Smontaggio e pulizia

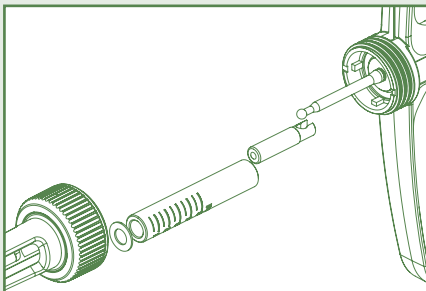


Smontare e pulire secondo le istruzioni della siringa.

In caso di ago danneggiato

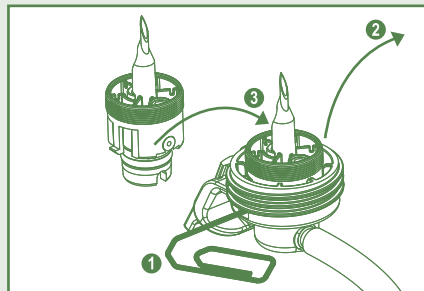

Spingere la graffetta ed estrarre l'assemblaggio dell'ago. Inserire l'assemblaggio del nuovo ago.

 Ago affilato = rischio di lesioni
Non perforare la medesima bottiglia svariate volte.

Informazioni per l'ordine

Descrizione	Conf.	Codice
Set porta flacone	1 / conf.	1.1810.010
Tubo di collegamento di ricambio, 55 mm	1 / conf.	1810.716
Assemblaggio dell'ago	1 / conf.	1810.386
Blocco della bottiglietta	1 / conf.	1810.374



I.1810VIAL.I - A0523