



SOCOREX® SELBSTFÜLLERSPRITZE CLASSIC 167/187

FishGuide™ – Montageanleitung


Montage

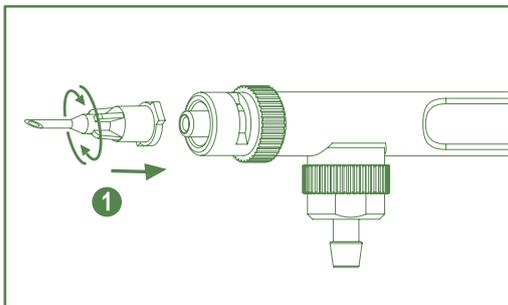

Nadel befestigen.

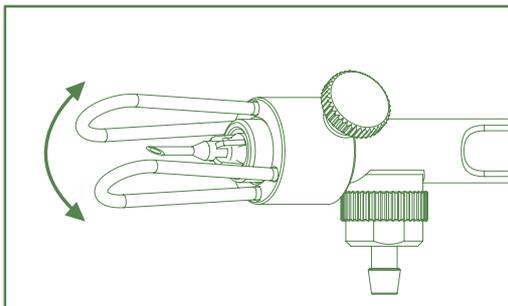

Winkel nach Bedarf anpassen.

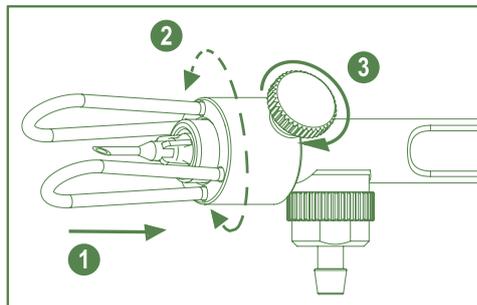

FishGuide™ bis zur Schnapp-Kupplung einfügen ①, Position justieren ②, Rändelschraube leicht anziehen ③.

Bestellinformationen

Beschreibung	Verp.	Kat. Nr.
FishGuide™ 15 mm	1/Vpk.	1.187.015
FishGuide™ 25 mm	1/Vpk.	1.187.025
FishGuide™ 45 mm	1/Vpk.	1.187.045



Unsachgemässes Einsetzen des FishGuide™ oder übermässiges Anziehen der Schraube kann den Luer-Lock-Ansatz beschädigen und die Nadelbefestigung beeinträchtigen.



Verringern Sie das Verletzungsrisiko, indem Sie den FishGuide™ beim Nadelwechsel entfernen.



1.187FGD.D - A0420