



# SOCOREX® SELBSTFÜLLERSPRITZE ULTRA 1810

## FishGuide™ – Montageanleitung


### Montage

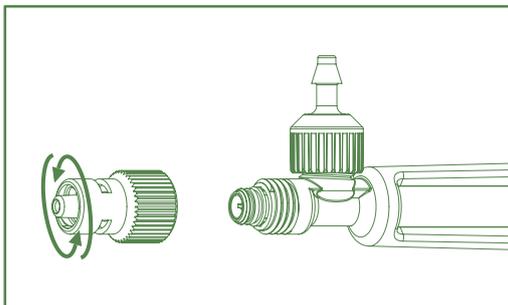


Luer-Lock-Ansatz abschrauben.

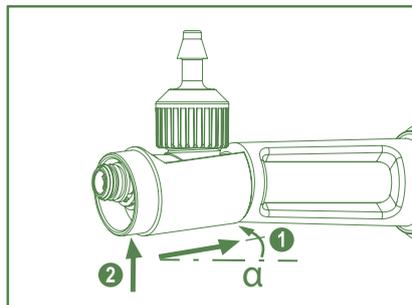


Schwarze Mantelung etwas winklig einführen **1** und bis zur Schnapp-Kupplung schieben **2**.

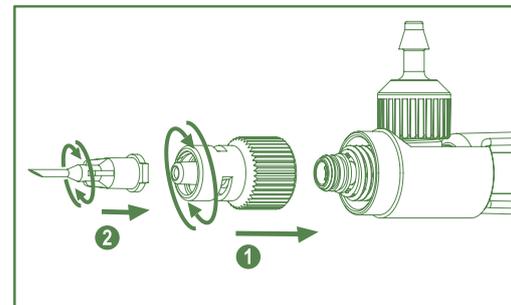

Luer-Lock-Ansatz anschrauben, Nadel befestigen.

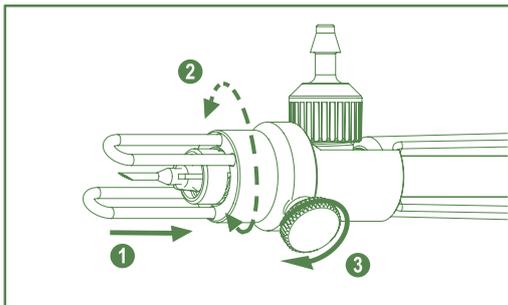

FishGuide™ aufstecken **1**, Position justieren **2**, Rändelschraube leicht anziehen **3**.

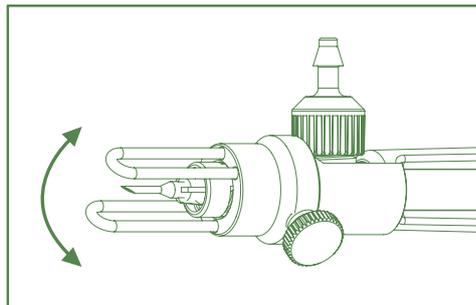

Winkel nach Bedarf anpassen.

### Bestellinformationen

| Beschreibung     | Verp.  | Kat. Nr.   |
|------------------|--------|------------|
| FishGuide™ 15 mm | 1/Vpk. | 1.1810.015 |
| FishGuide™ 25 mm | 1/Vpk. | 1.1810.025 |
| FishGuide™ 45 mm | 1/Vpk. | 1.1810.045 |



Unsachgemäßes Einsetzen des FishGuide™ oder übermässiges Anziehen der Schraube kann den Ansatz beschädigen und die Nadelbefestigung beeinträchtigen.



Verringern Sie das Verletzungsrisiko, indem Sie den FishGuide™ beim Nadelwechsel entfernen.

Schwarze Mantelung ist nicht autoklavierbar.